

# Erectieproblemen of kleine penis?

**Penisvergroter + pomp**

Kleur: transparant/zwart

Maat: maximaal 21 cm pik

**Bestelnr: 1328 39,50**

**Wat nu?**


**Niet zeuren maar:  
oplossen!**

Baat het niet dan schaadt het niet.  
(mits u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt)



**Geleverd met GRATIS Nederlandse gebruiksaanwijzing en een 'donut' afsluitring.**

**Penisvergroter + pomp**  
Kleur: transparant/zwart  
Maat: maximaal 21 cm pik  
Bestelnr: 1328 39,50

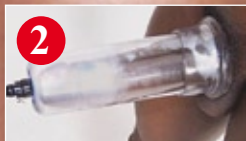

**4 ONTLUCHTINGS  
KNOP**



- Huls: 18,5 x 6 cm
- Schaar: 18 cm lang
- Rubberen slang: 75 cm

Bestelnr. 1145  
Inhoud: 40 ml  
**21,90**

### **Magnaphall**

De meest luxe creme om samen met de vergrotingspomp te gebruiken. Hij zorgt ervoor dat uw penis de hele dag goed doorbloed blijft, de aders in de penis soepeler worden en makkelijker bloed opnemen. Resultaat: de penis wordt nog forser in omvang.



**Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van uw potentie of eventueel het vergroten van uw penis?**

Dan heeft Blue & White goed nieuws voor u! We hebben onze oude vertrouwde penisvergroter aangepast aan de technieken en mogelijkheden van deze tijd. Resultaat: alles werkt nu nog eenvoudiger (en doeltreffender) door o.a. [de verbeterde nieuwe schaar pomp.](#)

En, als u zich aan de Nederlandse gebruiksaanwijzing houdt, beslist onschadelijk is voor uw penis. Dus probeer het ook eens: het kan immers altijd groter, beter of harder! 😊

**Met de B&W pomp kunt u twee dingen bereiken, het bekendste is penisvergroting. Zo simpel werkt het (korte uitleg):**

- 1- Men neemt de penis en smeert deze goed in met een 'natte' crème (bijv. 'Glide' siliconen glijmiddel (bestelnr. 1190) of de luxe variant Magnaphall (bestelnr. 1145).
- 2- U schuift de huls over de penis ([zie afbeelding 1](#)) en begint te pompen totdat er een vacuüm ontstaat. De penis zet nu op zover als u dat wilt ([zie afbeelding 2](#)) en toont meteen een stuk groter. Let op hoever u gaat!! Het mag beslist niet pijnlijk zijn.


**Nieuwsgierig hoe het verder gaat?** Dat leest u in onze GRATIS bijgeleverde Nederlandse gebruiksaanwijzing en als u deze STRIKT (!) opvolgt, bent u na het aflopen van de kuur (13 weken) op een gezonde manier de trotse bezitter van een een grotere of dikkere penis geworden! Zonder bijwerkingen en/of blauwe plekken (iets wat u bij goedkopere versies van onze concurrenten kan gebeuren. Let daar dus voor op!!!)

**Maar dat is niet het enige waar deze pomp goed voor is. Zo is het ook een uitstekend apparaat (bijvoorbeeld voor mannen die medicijnen slikken of heren die een dagje ouder zijn) om potentie-problemen te verhelpen. Dan werkt het als volgt:**

U schuift de huls over de penis, laat de pomp zui- gen totdat er een vacuüm ontstaat en het bloed loopt automatisch de penis in. De erectie is nu een feit! Druk de [ontluchtingsknop \(zie afbeelding 4\)](#) van de pomp in of plaats uw vinger tussen uw schaambe- en [de donutring \(zie afbeelding 3\)](#) en u kunt de penis uit de huls halen. Klaar voor gebruik!

Wordt de penis, meteen nadat u hem uit de huls heeft gehaald weer zacht? Niets aan de hand: ook daar heeft uw Blue & White een oplossing voor! Bel, mail of schrijf ons maar.

Nog een groot voordeel: als u het apparaat regelmatig gebruikt is de kans groot dat op den duur de erectie weer uit zichzelf tot stand komt.

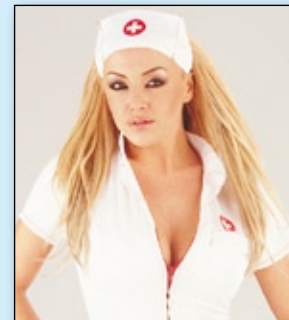

# Klaar!

*Kuur minimaal 13 weken*  
(zie Nederlandse gebruiksaanwijzing)



Bestelnr. 1190

Inhoud: 100 ml

**11,50**

## 'Glide'

Een glijmiddel op siliconenbasis om de penis goed nat en vet te maken zodat de penisvergroter optimaal zijn werk kan doen. Onmisbaar bij gebruik van onze penisvergroter! Het is namelijk heel belangrijk dat de dontring geen lucht in de huls laat glippen. 100 ml is genoeg voor één maand training. (Zie gebruiksaanwijzing).

VERZENDHUIS **BLUE & WHITE** AMSTERDAM™

[www.blue-white.nl](http://www.blue-white.nl) - e-mail: [klantenservice@blue-white.nl](mailto:klantenservice@blue-white.nl)

CEINTURBAAN 248, 1072 GG AMSTERDAM - TEL: 020-610 3341 - FAX: 020-662 9700